

Ako sledovať injektor


- ❖ Počas prvých 27 hodín umiestnenia injektora na telo, by ste mali vidieť kontrolku pomaly blikajúcu nazeleno.
- ❖ 2 minúty pred podaním bude injektor niekoľkokrát pípať.
- ❖ Keď sa začne podávanie dávky, uvidíte rýchlo blikajúce zelené svetlo.
- ❖ Podanie dávky bude trvať približne 45 minút.
- ❖ Keď sa podávanie dávky ukončí, ozve sa dlhé zapípanie a kontrolka bude svietiť nepretržite nazeleno.
- ❖ Po ukončení podávania dávky injektor pomaly odstráňte. Skontrolujte, či je prázdny.

- Okamžite kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka, ak zaznamenáte akékoľvek problémy s injektorom, alebo máte príznaky infekcie ako sú horúčka, triaška alebo potenie.
- Nepokúšajte sa upevniť alebo opätovne aplikovať injektor, ak sa uvoľní.


Okamžite kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka, ak sa stalo čokoľvek z nasledovného - možno ste nedostali celú dávku:

- Kontrolka bliká načerveno.


Kontrolka bliká načerveno

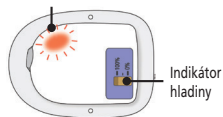


- Náplast (časť ktorá sa dotýka vašej pokožky) je nápadne mokrá a/alebo z nej odkvapkáva.

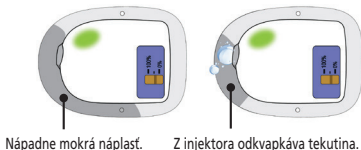

- Náplast sa uvoľní z pokožky kedykoľvek pred ukončením podania dávky.

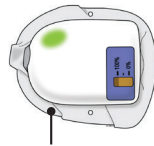

- Ak nie je čiarka v indikátore hladiny vedľa nápisu 0% po uplynutí 45 minútovej doby určenej na podanie.

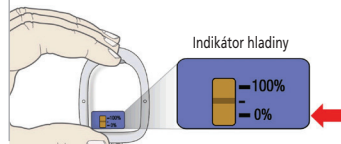

Nepokúšajte sa za žiadnych okolností upevniť alebo znovu aplikovať injektor, ak sa odlepí.

Neulasta® (pegfilgrastim)

Injektor na telo Informačná karta pre pacienta

- ❖ Otvorte, prosím, túto kartu a prečítajte si obidve strany.
- ❖ Noste ju pri sebe.
- ❖ Táto karta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré potrebujete, ak ste liečený pegfilgrastimom pomocou injektora.
- ❖ Ukážte túto kartu vášmu zdravotníckemu pracovníkovi, ak potrebujete naliehavú medicínsku pomoc ohľadne injektora.

AMGEN

Amgen Slovakia
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Dôležitá informácia

Cieľom tejto informačnej karty je pomôcť predchádzať medikačným chybám – najmä poddávkovaniam.

- ❖ Poddávkovanie lieku môže nastať, ak sa injektor na telo (ďalej len „injektor“) uvoľní z vašej kože, odkvapkáva alebo zlyhá iným spôsobom.
- ❖ V takomto prípade môžete byť vystavený zvýšenému riziku závažnej infekcie.

Ak potrebujete viac informácií:

- ❖ Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je priložená v balení injektora na telo.
- ❖ Navštívte internetovú stránku Európskej agentúry pre lieky (EMA) (<http://bit.ly/2kt26wk>) a/alebo stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk)

Nasledujúce činnosti môžu ovplyvniť funkciu injektora:

- ❖ Do injektora **nenarážajte** ani ho **neťahajte**.
- ❖ V blízkosti injektora **nepoužívajte** pleťové mlieka, krémy alebo čistiace prostriedky.
- ❖ **Nespíte** na injektore ani naň netlačte, kým ho nosíte.
- ❖ Nevystavujte injektor nasledujúcemu: CT vyšetrenie, MR vyšetrenie, ultrazvuk, röntgenové vyšetrenie, radiačná liečba, hyperbarická komora.
- ❖ **Noste voľné oblečenie** a pri prezliekaní si dávajte pozor.
- ❖ **Injektor uchovávajte vo vzdialenosti najmenej 10 cm od elektrických zariadení** (ako sú mobilné telefóny alebo mikrovlnné rúry).

Prečítajte si, prosím, túto kartu a noste ju pri sebe.

Nasledovné informácie vyplní váš zdravotnícky pracovník.

Injektor bol aplikovaný na pokožku:

Deň	Čas
-----	-----

Začiatok podania dávky:

Deň	Čas
-----	-----

Č. šarže injektora:

Kontaktné informácie pre naliehavé stavy

Meno a kontakt na zdravotníckeho pracovníka

Meno/Priezvisko

Telefónne číslo

Kontakt na urgentnú pomoc v čase mimo pracovných hodín
